

組立方法

【手順】 1. ①②の順で、罫線に沿ってしっかりと罫線に沿って折り曲げます。

2. ③④⑤を差し込む前に赤線内に紙を入れて置きます。

3. ③④⑤の順で切れ込みに、奥までしっかりと差込みます。

4. ⑥⑦の切れ込みの部分に角を差込みます。(正面図参照)※

5. ⑧⑨⑩の順にベルト部分の穴にシールドを差込みます。(図A参照)※


6. ⑫⑬⑭の順にベルト部分の穴にシールドを差込みます。(図A参照)※

7. ベルト側⑪⑮の爪を立ててシールドに差込み折り曲げて固定してください。(図A参照)※


8. ⑯のベルトの先端部をご自身のサイズに合った大・中・小・特小の穴にはめ込みベルトを円弧の状態にする。

※円弧の状態が悪い場合は、ご自身で形をきれいに整えてからご使用ください。


【正面図】

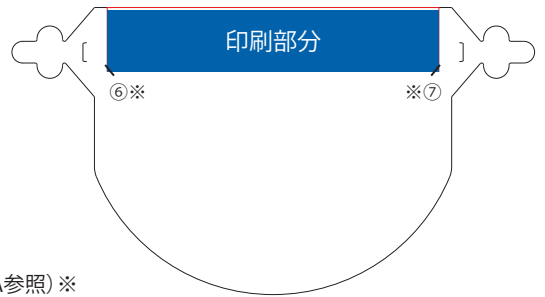

【展開図:シールド】

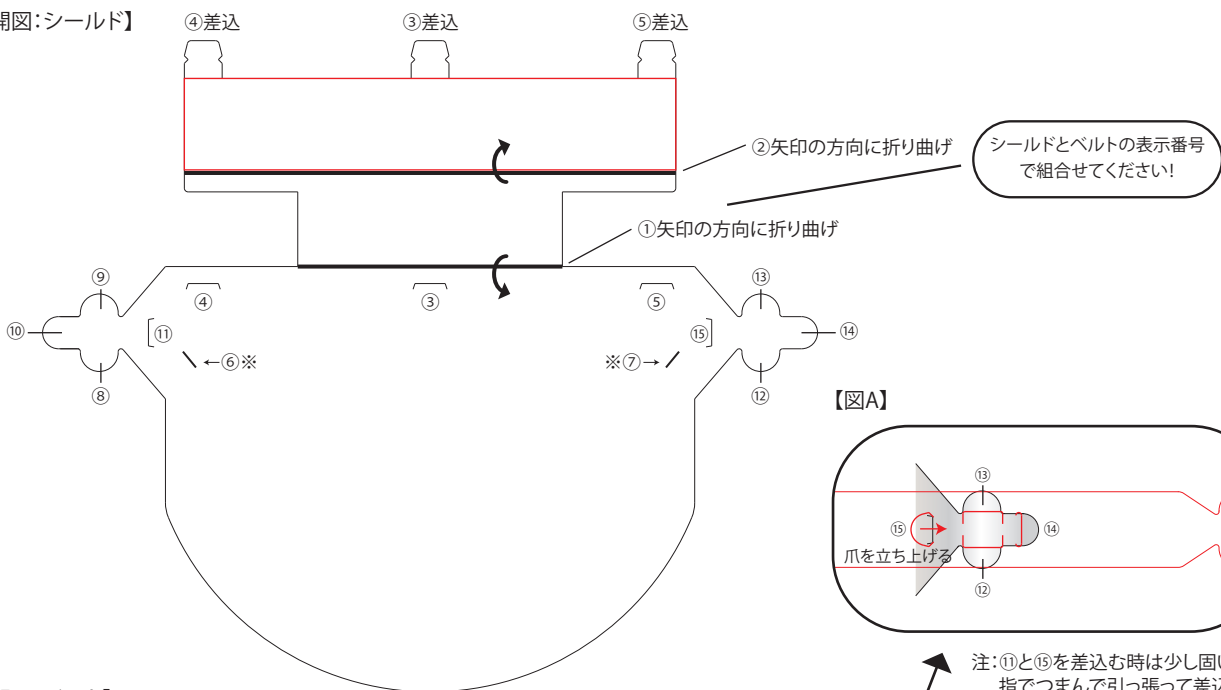

【展開図:ベルト】

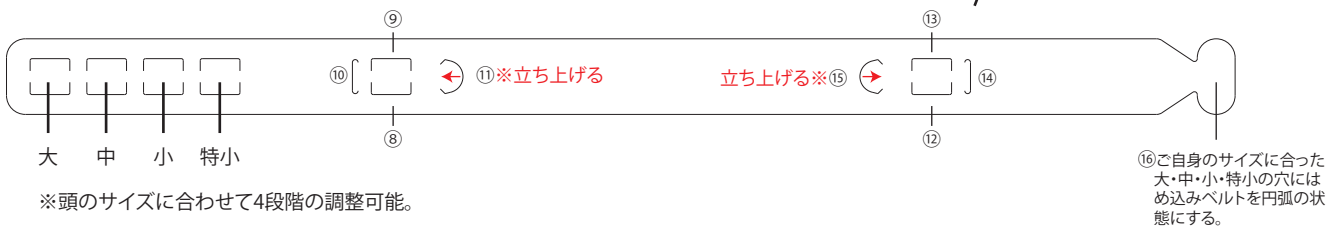

ご使用上の注意

- ・本製品は簡易的な飛沫防止を目的としたシールドです。完全にウィルスを防ぐものではありません、ご使用の際は十分に注意を払いながらご使用ください。※本製品は滅菌されておりません。
- ・シールドは薄く透明性が高い為、シールドを認識しづらい事があります。顔などに怪我をしない様に注意してご使用ください。また屋外でご使用の際、風などが強い場所でのご使用はおやめください。
- ・ご使用時や組立時にシートの端で手指を傷つける可能性がありますのでご注意ください。万一破損した場合は、ご使用をおやめください。
- ・シールドに付着した汚れは視界を低下させ安全の妨げになりますので、中性洗剤で手洗いし水洗い後柔らかい布等で拭き取ってください。また有機溶剤など、不適合な薬品を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので、おやめください。
- ・火気のそばや直射日光のあたる場所、お子さまの手の届く所での保管やご使用はおやめください。
- ・本品をご使用後は、紙とプラスチックに分別しそれぞれの自治体の取り決めに基づいて廃棄してください。
- ・ご使用者による改造、修理は事故の原因となり危険ですとおやめください。
- ・製品本来の使用目的と異なる用途でのご使用はおやめください。※使用者の目や身体の損傷を防ぐことを保証するものではありません。

Cambe 日本製 PAT.P

株式会社カンベ

〒577-0807 大阪府東大阪市菱屋西2-7-22